


Monitor dei segni vitali Propaq®

Guida rapida

Paziente neonato — Dalla nascita fino a 28 giorni o 44 settimane di gestazione
 Paziente pediatrico — Da 29 giorni a 12 anni
 Adulto — Dai 13 anni in poi

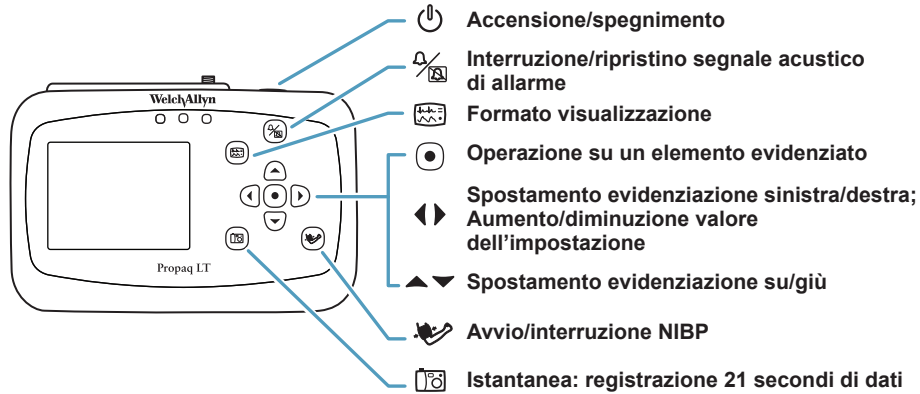

Modifica dei limiti di allarme (seleziona) (seleziona parametro) (modifica limiti)
 (FC/FP, NIBP, SpO₂, Resp)

Modifica del segnale acustico di allarme (SpO₂) Imposta Allarmi - Seg allar (seleziona)
 (Basso, Medio, Alto)

Interruzione/ripristino segnale acustico di allarme
 Sospensione segnali acustici di allarme (FC/min) Imposta Allarmi - All. ac. sospesi
 (seleziona)

Modifica impostazioni (segni vitali) (seleziona) (parametro)
 (FC/FP, NIBP, SpO₂, Resp)

Cambia modalità paziente (Adulto, Paziente pediatrico, Paziente neonato) Adulto (seleziona)

Cambia derivazione II (seleziona)
 (I, II, III, ...)

Imposta modalità NIBP NIBP mmHg Modalità NIBP (seleziona)
 (Auto, Manuale, Turbo)

Modifica impostazione monitor (NIBP) Imposta (seleziona) (valori impostati)
 (Allarmi, ECG, NIBP, ...)

Modifica ora/data xx:xx:xx (seleziona) (modifica)
 (Ora, Minuto, Mese, ...)

Visualizzazione tendenze (NIBP) Tendenze

Visualizzazione istantanee (FC/min) Istantanee