


Propaq® LT-Vitalfunktionsmonitor

Kurzanleitung

Neugeborene — Von der Geburt bis zum 28. Tag bzw. bis zu einem Gestationsalter von 44 Wochen
 Kinder — 29 Tage bis 12 Jahre
 Erwachsene — 13 Jahre oder älter

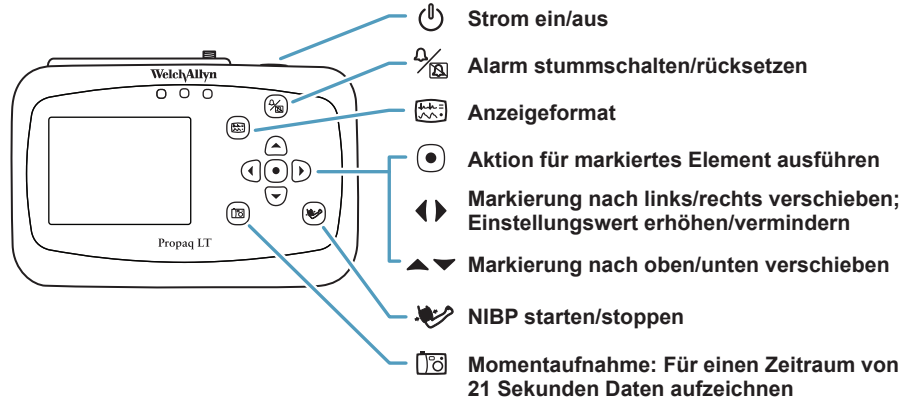

Alarmgrenzen ändern (HF/PF, NIBP, SpO₂, Resp) (Auswählen) (Parameter auswählen) (Grenzwerte ändern)

Alarmton ändern (Leise, Mittel, Laut) (SpO₂) Setup Alarme – Alarmton (Auswählen)

Alarmton stummschalten/rücksetzen

Alarmtöne aussetzen (HF/min) Setup Alarme – Akust. Alrm aussetz
 (Auswählen)

Einstellungen (der Vitalfunktionen) ändern (Auswählen) (Parameter)

Patientenmodus ändern Erwachsene (Auswählen)
 (Erwachsene, Kinder, Neugeborene)

Ableitung ändern (I, II, III, ...) II (Auswählen)

NIBP-Modus einstellen NIBP mmHg NIBP-Modus (Auswählen)
 (Auto, Manuell, Kont)

Monitor-Setup ändern (NIBP) Setup (Auswählen) (Werte einstellen)
 (Alarme, EKG, NIBP, ...)

Datum/Zeit ändern xx:xx:xx (Auswählen) (Ändern)
 (Stunde, Minute, Monat, ...)

Trends anzeigen (NIBP) Trends

Momentaufnahmen anzeigen (HF/min) Momentaufn